



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

La Dirección de la Facultad de Odontología, UANL que encabeza la DRA. ROSA ISELA SÁNCHEZ NÁJERA, anuncia para todo el alumnado, profesorado y la comunidad odontológica nacional e internacional, el seguimiento para la esterilización adecuada de las piezas de mano. Dado que la realización de esta esterilización es elemental para evitar la contaminación cruzada entre nuestros pacientes, tan solo se debe poseer piezas de mano en las que el instructivo diga la leyenda “autoclavable”.

SEGUIMIENTO

1. Quitar la fresa
2. Lavar con agua, jabón y cepillo
3. Secar
4. Lubricar
5. Empacar
6. Esterilizar
7. Desenvolver frente al paciente
8. Lubricar
9. Colocar la fresa
10. Enroscar en el conector
11. Purgar excedente de aceite.

DRA. ROSA ISELA SÁNCHEZ NÁJERA

Directora

DRA. ANA MARÍA GARZA GARZA

Coordinación Técnica de Atención a la Salud

Septiembre 2014